



DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO ODSÁVACÍ SYSTÉMY

Dentasept® Aspiration AF+

DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO ODSÁVACÍ SYSTÉMY, ODLUČOVAČE AMALGÁMU A PLIVÁTKA

Vysoce účinný tekutý koncentrát určený pro každodenní dezinfekci a čištění všech typů odsávacích systémů, odlučovačů amalgámu a plivátek.

- Nepění
- Velice ekonomický: Při potřebě získání 2% roztoku se naředěním 5 litrů produktu získá 250 litrů pracovního roztoku
- Účinný od 15 minut - účinný proti obaleným virům¹



1. Institut Roberta Kocha doporučuje používání dezinfekčních prostředků, které mají omezeně virucidní účinnost, k přerušení řetězce infekce. Podle RKI omezená virucidní účinnost (účinnost proti obaleným virům) znamená účinnost proti viru Vaccinia a BVDV.

Dentasept® Aspiration AF+

Dezinfekční a čistící prostředek odsávacích systémů, odlučovačů amalgámu a plivátek

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím: Navlečte si ochranné rukavice.


Jak používat: Na konci směny připravte 2 litry zředěného roztoku pomocí systému Dentasept® ASP.




1. Příprava 2% roztoku (40 ml produktu na 2 litry vody). 1L láhev: naplňte dávkovač k trysce 20 ml a znovu opakujte. 5L kanystr: dvakrát stiskněte pumpu




2. Lehkým potřesením systému Dentasept® ASP promíchejte roztok.

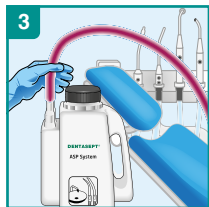

3. Připojte systém Dentasept® ASP k odsávacímu systému a nasajte zředěný roztok.

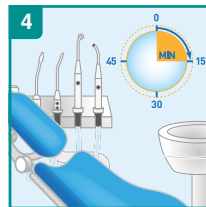

4. Nechte působit minimálně 15 minut. Roztok může být ponechán v systému Dentasept® ASP přes noc.

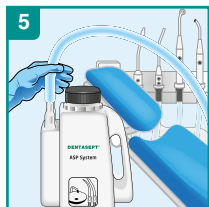

5. Po dokončení naplňte systém Dentasept® ASP alespoň 1 litrem čisté vody a systém propláchněte.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Čirý, růžový roztok
- Relativní hustota při 20°C: 1,062
- pH koncentrovaného roztoku při 20°C: 10,7
- pH zředěného roztoku ve 2%: 10,9

MIKROBICIDNÍ VLASTNOSTI

ÚČINNOST	KONCENTRACE	DOBA EXPOZICE
Baktericidní* - EN 13727/EN 14561	1%	15 min
Proti kvasinkám* - EN 13624/EN 14562	1%	15 min
Tuberkulocidní* - EN 14348/EN 14563	1.6%	60 min
Proti obaleným virům* - EN 14476/EN 17111	2%	15 min

*= nečisté podmínky

BALENÍ A INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

VÝROBEK	VELIKOST BALENÍ	KÓD PRO OBJEDNÁNÍ
Dentasept Aspiration AF+	3 x 1L láhev	3103010
Dentasept Aspiration AF+	1 x 5 L kanystr s dávkovací pumpou	3103030

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti : H290 Může být korozivní pro kovy.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít.

Opatření:

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributor pro ČR:

ECOLAB s.r.o.

Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika

OBLAST POUŽITÍ

Dezinfekční a čistící prostředek pro odsávací systémy, odlučovače amalgámu a plivátka. Kompatibilní s různými odsávacími systémy. Nepění.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím: Navlečte si ochranné rukavice

Jak používat: Na konci směny připravte 2 litry zředěného roztoku pomocí systému Dentasept® ASP.

1. Připravte 2% roztok (40 ml produktu na 2 litry vody). 1L lahev: naplňte dávkovač k trysce 20 ml a znovu opakujte. 5L kanystr: dvakrát stiskněte pumpu
2. Lehkým potřesením systému Dentasept® ASP promíchejte roztok.
3. Připojte systém Dentasept® ASP k odsávacímu systému a nasajte zředěný roztok.
4. Nechte působit minimálně 15 minut. Roztok může být ponechán v systému Dentasept® ASP přes noc.
5. Po dokončení naplňte systém Dentasept® ASP alespoň 1 litrem čisté vody a systém vypláchněte.

SLOŽENÍ

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, povrchově aktivní láky, chelatační činidlo, barviva a pomocné látky.

SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí. Respektujte informace pro používání (vytvořené v souladu s evropskými pravidly pro klasifikaci a označování chemických směsí). Skladování: +5°C až +25°C.

CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku Dentasept Aspiration AF+ je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

