

RYCHLÁ DEZINFEKCE POVRCHŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH POVRCHŮ

Incidin™ Liquid

Dezinfekční spray na bázi alkoholu k přímému použití
pro aplikaci postříkáním

Neředěný přípravek je určen
k přímému použití na plochy.
Kombinuje velmi rychlé působení za
krátkou dobu a snadnou manipulaci.
Receptura přípravku umožňuje rychlé
zasychání na ošetřených plochách,
kde nezanechává zbytková rezidua.

Navíc tento přípravek nabízí vysokou
míru spolehlivosti pro uživatele díky
širokému spektru účinnosti včetně
působení proti TBC a Norovirům.

Incidin Liquid navíc nabízí:

- ▲ Působí v krátké době
- ▲ Receptura neobsahuje aldehydy
- ▲ Příjemná parfemace
- ▲ Testováním doložená kompatibilita
se systémem utěrek Incidin Dry Wipes



Incidin™ Liquid

Dezinfekční spray na bázi alkoholu k přímému použití pro aplikaci na povrchy zdravotnických prostředků postříkem

Proč používat Incidin™ Liquid?

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI ZA KRÁTKOU DOBU PŮSOBENÍ

Přípravek nabízí široké spektrum účinnosti proti mikroorganismům během krátké doby působení. Incidin Liquid je doporučován na odděleních intenzivní péče a všude tam, kde hrozí nebezpečí infekce. Podrobnosti k účinnosti najdete v níže uvedené tabulce.

SPOLEHLIVÉ POUŽITÍ

Přípravek se neředí a je připraven k okamžitému použití pro dezinfekci materiálů odolných vůči působení alkoholu. Incidin Liquid představuje jistotu při dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů.

BEZ ALDEHYDŮ A BEZ BARVIV

Receptura přípravku neobsahuje aldehydy a ani barviva. Přípravek má příjemnou vůni, produkt je praktický a spolehlivý.



Incidin Liquid
láhev 1 l

Incidin Liquid
5L kanistr

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST NEŘEDĚNÉHO ROZTOKU	DOBA PŮSOBENÍ
Dezinfekce povrchů dle metodiky VAH s a bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky, tuberkulocidní) - čisté i nečisté podmínky	5 min
Rychlá dezinfekce dle metodiky DGHM 2001 bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky) - čisté i nečisté podmínky	1 min
EN 13727 (baktericidní) - čisté i nečisté podmínky	1 min
EN 13624 (fungicidní - kvasinky) - čisté i nečisté podmínky	1 min
EN 14348 (tuberkulocidní) - čisté i nečisté podmínky	1 min
Účinek proti obaleným virům (vč. HIV, HBV, HCV)* dle doporučení RKI 1/2004	30 sec
Adeno*	1 min
Rota*	30 sec
Papova*	10 min
Noro*	10 min

* DVV 2008

CE 0297

ECOLAB HYGIENE S.R.O.

Hlinky 118
603 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 543 518 247
www.ecolab.com

ECOLAB HEADQUARTERS:

ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com



ECOLAB

DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+41 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

RYCHLÝ ÚČINNÝ SNADNÝ

OBLAST POUŽITÍ

Incidin Liquid je přípravek k okamžité dezinfekci materiálů odolných vůči působení alkoholu určený pro ošetření povrchů zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Neředěný přípravek aplikujte s pomocí utěrky z netkané textilie, rozetřete jej na plochách odolných vůči působení alkoholu a nechte působit do zaschnutí. Při aplikaci postříkem dodržujte vzdálenost asi 30 cm od ošetřovaného povrchu (40 ml/ m²) a pak nechte přípravek zaschnout.

SLOŽENÍ

100 g roztoku obsahuje následující účinné látky: 35 g 2-propanolu, 25 g 1-propanolu

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	MNOŽSTVÍ KUSŮ V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Incidin Liquid SPRAY láhev 600 ml s aplikátorem	12	3086930
Incidin Liquid láhev 1 l	12	3042450
Incidin Liquid kanistr 5 l	5 l	3042470

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě při teplotách do 25 °C, mimo přímé sluneční světlo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:



Signální slovo: Varování
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závrať.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na etiketě a připojené informace o přípravku. Podrobné informace pro bezpečné nakládání s přípravkem viz bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

2017 / 017 APPR. 2017.11.21.

ECOLAB®